




DEFIGARD 5000

Une nouvelle vision de la défibrillation intra hospitalière

Le DEFIGARD 5000 associe l'efficacité d'un défibrillateur biphasique pulsé (*MULTIPULSE BIOWAVE*®) à un monitoring de précision sur le plus grand écran couleur du marché.



MULTIPULSE
BIOWAVE

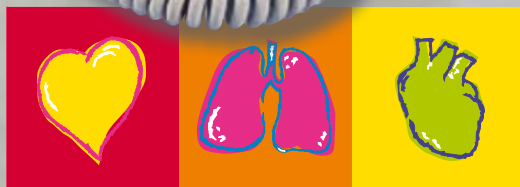

SCHILLER

The Art of Diagnostics

DEFIGARD 5000

Moniteur / Défibrillateur

La taille de l'écran couleur (10.4") permet de visualiser jusqu'à 12 dérivations ECG simultanément. Le bouton de navigation et les touches de fonctions directes donnent un accès rapide aux différents paramètres et menus et en font un appareil très convivial, facile d'utilisation. Disposant des modes DSA (défibrillateur semiautomatique) et manuel, le DEFIGARD 5000 est l'appareil idéal pour toutes les situations d'arrêt cardiaque :

- Il est utilisable avec des électrodes adhésives, de poing ou internes
- Il dispose d'un stimulateur cardiaque externe et des fonctions de monitoring : ECG, SpO2 (Masimo ou Nellcor), CO2 (IRMA) et PNI, qui permettent d'assurer une prise en charge continue des patients.

Une gamme complète de fonctions avancées :

Défibrillation utilisant la technologie à basse énergie *MULTIPULSE BIOWAVE*®. Un système de cassettes permet de passer facilement d'un mode de défibrillation à un autre

- Mode DSA avec électrodes adhésives: Energies configurables de 2 à 200 J (adultes) ou de 2 à 70 J (enfants); détection automatique des électrodes pour enfants et adaptation de l'énergie

L'utilisateur est guidé dans la procédure de défibrillation par des instructions sonores et visuelles qui s'affichent sur le grand écran couleur



- Mode manuel, avec les électrodes de poing ou adhésives, sélection de l'énergie de 2 à 200 J
- Défibrillation interne de 2 à 30 J

DEFIGARD 5000

Stimulateur cardiaque (Option):

- Mode de fonctionnement Fixe, Demande et Overdrive (fréquence x3)
- Mémorisation des réglages (courant et fréquence) pour une reprise rapide de la stimulation.

Moniteur:

- Grand écran couleur à cristaux liquides de 10.4 pouces
- Affichage: instructions DSA, mesures et courbes pour SpO_2 , CO_2 , PNI et jusqu'à 12 dérivations ECG

Imprimante (Option):

- Imprimante 3 pistes
- Déclenchement automatique ou manuel, impression des courbes, mesures, événements, tendances et alarmes

Enregistrement des données:

- Mémoire interne permettant le stockage de 45 minutes d'ECG et 500 événements en mode DSA, ainsi que 24 heures de tendances sous forme graphique et tabulaire pour tous les paramètres
- Téléchargement des données DSA à l'aide d'une clé via le port USB

Communications:

- Transmission d'un ECG 12 dérivations via GSM ou modem standard (Option)
- Connexion Ethernet ou USB pour mise à jour du logiciel



Affichage simultané des 12 dérivations ECG



Affichage du plétysmogramme



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es




Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

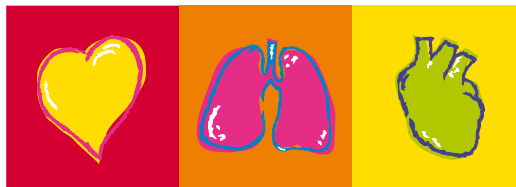

SCHILLER

The Art of Diagnostics